



## LE CONCEPT DE MOBILITÉ

Le Protecteur permet d'effectuer un transport intraclinique flexible et sûr d'une sonde TEE, du stockage à l'examen. Le Protecteur offre une disponibilité immédiate de la sonde retraitée sur le chariot d'urgence ou la tige porte-sérums. En cas d'urgence, une réponse rapide peut ainsi être fournie.

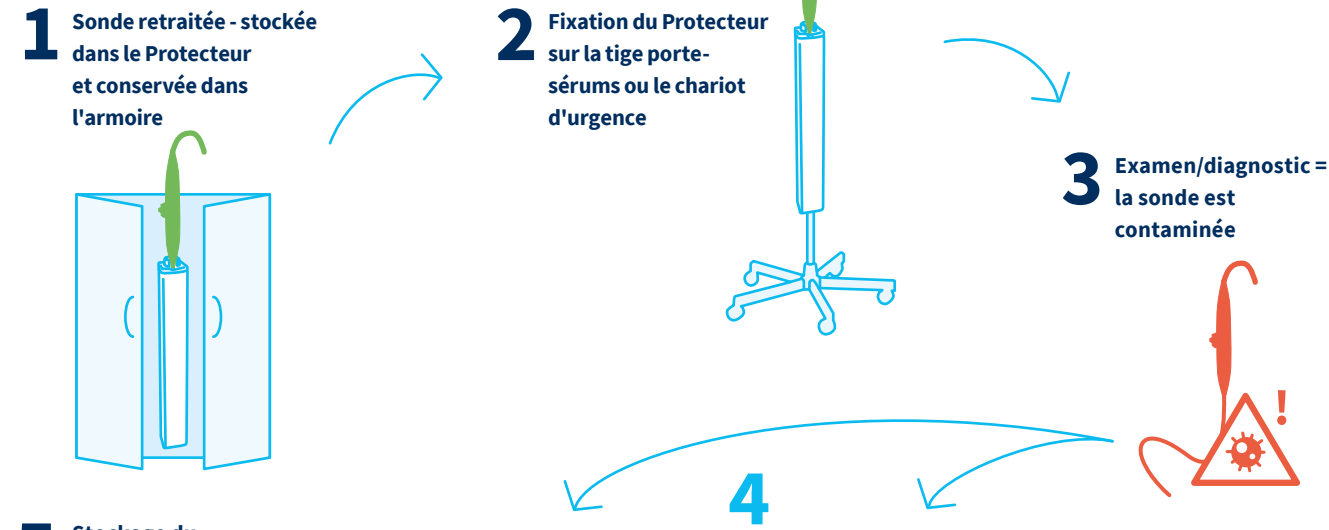

**5** Stockage du Pro-jector retraité dans l'armoire ou à nouveau directement sur la tige porte-sérums/le chariot d'urgence

Sonde désinfectable par immersion

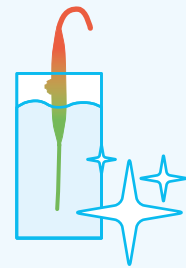

Retraitement de la sonde par désinfection par immersion et retraitement du Protecteur par désinfection par essuyage

Désinfectable par immersion\*

1. Nettoyage
2. Désinfection par immersion
3. Vérification de l'étanchéité
4. Nouvelle désinfection par immersion
5. Stockage dans le Protecteur

\*étapes du processus nécessaires en fonction des spécifications et de l'utilisation

Protecteur désinfectable par essuyage



Retraitement de la sonde et du Protecteur par désinfection par essuyage

Désinfectable par essuyage

- Sonde TEE et Protecteur



5

**ANKLIN**  
Excellence in Endoscopic Solutions

Premier Protecteur thermodésinfectable jusqu'à 95°C pour un retraitement valide! (Version C)

**ENDO PROTECT**

MIEUX PROTÉGÉ & PLUS SÛR

Transport et stockage pour les endoscopes et fibroscopes

Transport et stockage pour les endoscopes et fibroscopes !

Transport et stockage pour les endoscopes et fibroscopes

MIEUX PROTÉGÉ & PLUS SÛR

**ENDO PROTECT**

Distribué par

**ANKLIN AG**  
Bodenmattstrasse 34  
CH-4153 Reinach

Téléphone +41 61 717 55 55  
<https://anklin.ch/>

État : 2021

**ANKLIN**  
Excellence in Endoscopic Solutions



**TEE**  
CARE


**MIEUX PROTÉGÉ & PLUS SÛR**

Transport, stockage et possibilité de retraitement pour les sondes TEE

# TEE CARE

Transport, stockage et possibilité de retraitement pour :

- sondes TEE

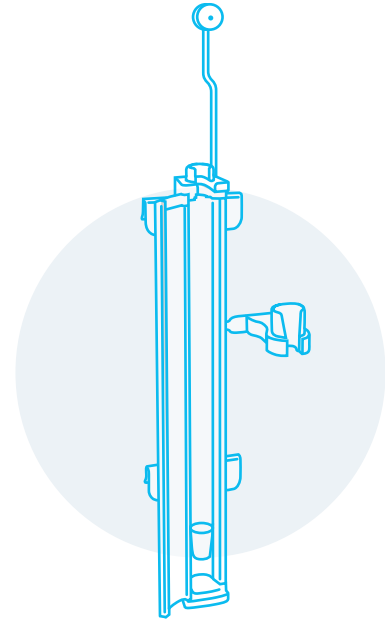

• **PAS DE DÉFORMATION** en raison du stockage suspendu

• **PROTECTION MÉCANIQUE** de la sonde TEE : Protection contre les dommages et protection pendulaire

• **PAS DE CONTAMINATION** en raison du stockage à l'abri de la poussière

• **MARQUAGE CLAIR**  
Sonde retraitée/contaminée

• **DÉSINFECTABLE PAR ESSUYAGE**  
Surfaces lisses et bonne accessibilité pour la désinfection par essuyage

• **DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE** de la sonde TEE retraitée

• **CONFIGURABLE**  
convient à tous les fabricants de connecteurs

• **POULIE DE CÂBLE** pour un guidage des câbles optimal et sans coude

• Possible en tant que **SYSTÈME COMPLET**, possibilités de montage du Protecteur sur :  
» Armoire encastrée  
» Tige porte-sérums\*  
» Chariot de transfert  
» Rails muraux

• **CONFORME À LA MDR**

\* Pour une utilisation mobile, veiller à ce que la tige ne puisse pas basculer et que le protecteur soit solidement fixé.



immédiatement disponible

convient à tous les fabricants

